


# Asztali állvány Protect 800-as típushoz

Ezt az asztali állványt kifejezetten a Protect 800-as készülékhez tervezték. A készülék biztonságos elhelyezésének érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági előírást.

## ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezze az asztali állványt egy sima, vízszintes felületre.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján lévő két kulcslyuk alakú nyílás egy vonalban legyen az asztali állvány két csavarjával.
3. Akassza a készüléket az asztali állványra, ügyelve arra, hogy a csavarok és a készülék szorosán kapcsolódjanak.
4. Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesen áll-e az állványon.
5. Az asztali állvány hátulján levő rögzítő csapoknak (rugós ellentartással rendelkeznek) óvatosan a helyükre kell kattanniuk, amikor a készülék a megfelelő pozícióba kerül. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne álljon el az állványtól.

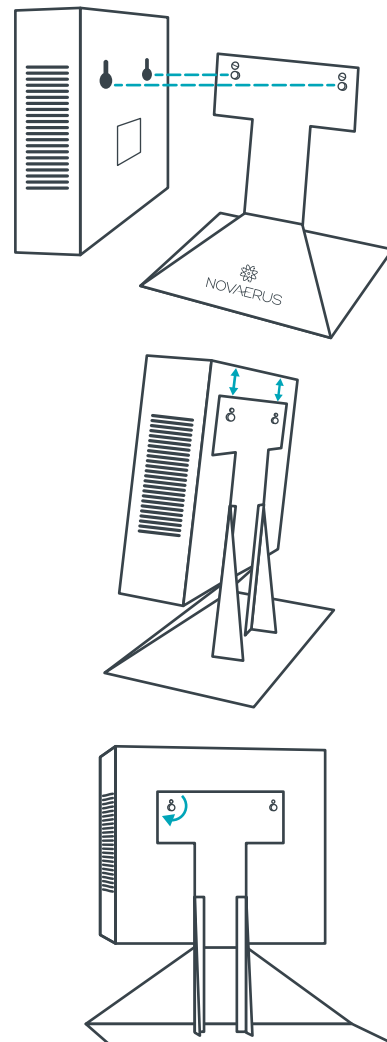

## SZÉTSZERELÉS

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. Óvatosan húzza ki az állvány hátulján lévő rögzítő csapokat (rugós ellentartással rendelkeznek), és emelje felfelé a készüléket (először az egyik, majd a másik oldalt).

