


Magas állvány Protect 800-as típushoz

Ezt a magas állványt kifejezetten a Protect 800-as készülékekhez tervezték. A készülék biztonságos elhelyezésének érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági előírást.


KICSOMAGOLÁS

1. A csomagolóanyag eltávolításához használjon sniccet/ollót. VIGYÁZZON, hogy a vágás során ezek éles felülete ne sértse meg a festékréteget.
2. A becsomagolt rúd közepe táján a csomagolóanyagban van két csavar, ne dobja ki.
3. Az alj kicsomagolása után a fékezett kerekeket még ne oldja ki.

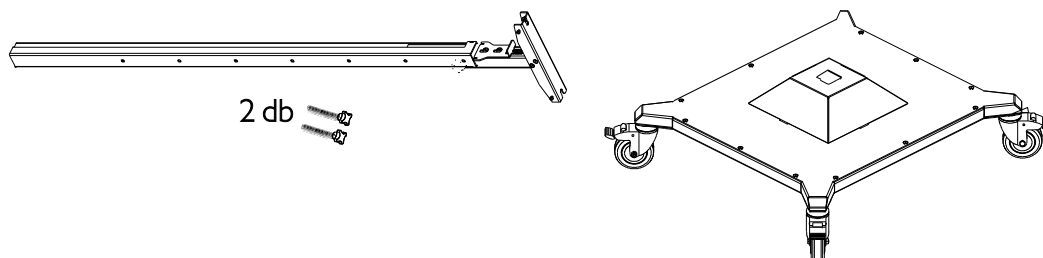


ÖSSZESZERELÉS

1. Tegye bele a rudat enyhe oldalirányú mozgás közben lefelé nyomva. A festékréteg vastagságától függően szorulhat. Teljesen az alj alsó részéig be kell csúsznia (alulról, a csavarfurat felől nézve nem lehet rés a rúd és az alj között).

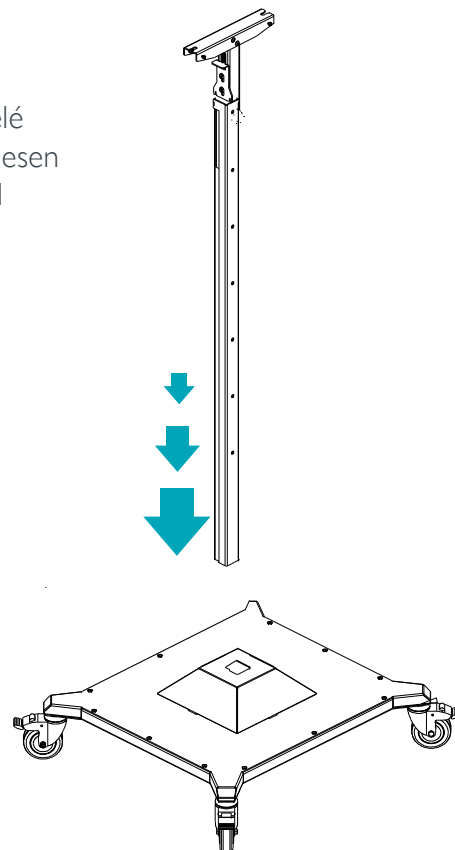

2. Döntse oldalra az aljat úgy, hogy a rúd vége a padlóra támaszkodjon és csavarja be a csavart - az alj mozgatásával segítse a rúdon és az aljon lévő furatok illeszkedését.

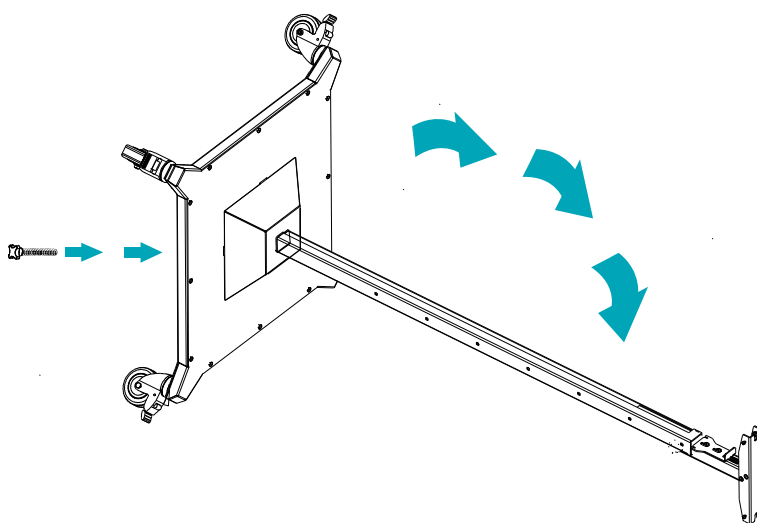


3. Kézzel szorítsa meg a csavart úgy, hogy a rúd ne mozogjon.

4. Fordítsa vissza az állványt függőleges helyzetbe.


4. Tegye rá a mellékelt 5 m-es lengő hosszabbítót. (Fel kell tekerni és a rúdra ráhúzva az aljra rakni).

5. A készülék felhelyezését megelőzően mozgassa a rúd felső részét a kívánt magasság beállításához. A készülék teteje kb. 10 cm-rel feljebb lesz, mint a rúd teteje. A furatok segítségével a magasság 5 fokozatban állítható. A jellemző ajtónyílás / liftajtó magasságához a 3. furat használata javasolt.


6. A rögzítőcsavart a legalacsonyabb pozícióhoz is használja, ne hagyja, hogy a felső rúd teljesen belecsússzon az alsóba, mert ez a készülék helyes rögzítését megakadályozhatja. Vigyázzon a felső rúd mozgatásakor, mert azt elengedve a rúd hirtelen lecsúszhat és sérülést okozhat. A csavart érdemes a menet nélküli furat irányából a rúdba csavarni, mert így gyorsabban becsavarható.

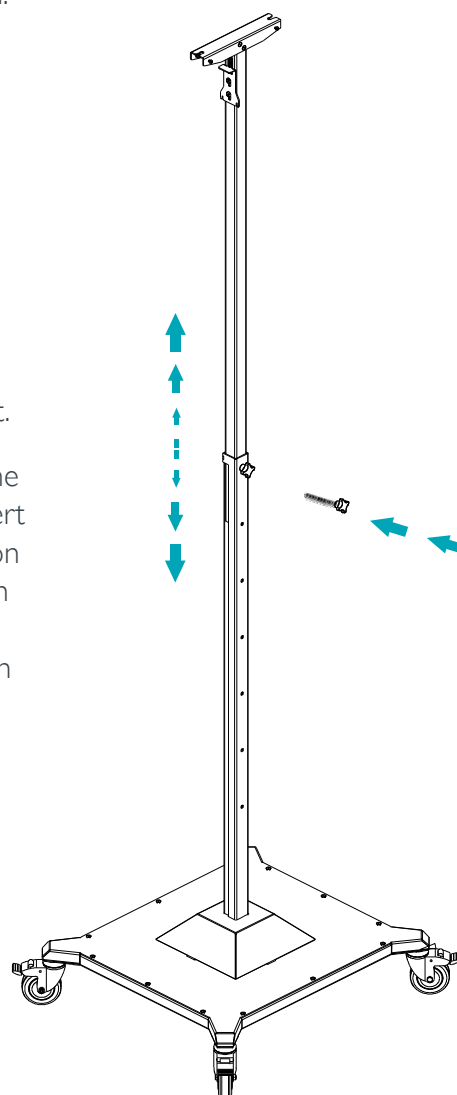


7. Ellenőrizze, hogy a Protect 800-as készülék kivethető előszűrője ki van-e tisztítva és a helyén van-e. Kapcsolja be a Protect 800 készüléket a tetején lévő billenőkapcsolóval és állítsa be a kívánt légcseres szintet (I: 220 m³/óra, II: 260 m³/óra). A készülék a továbbiakban a kapcsolóval vagy a hálózati csatlakozó csatlakoztatásával is ki/be kapcsolható.
8. Emelje fel a Protect 800 készüléket és a hátoldalon lévő két fordított kulcslyuk alakú nyílásba akassza be az állvány T alakú felső idomán lévő csavarokat. Az állvány kialakításától függően egy vagy két Protect 800-as készülék helyezhető el az állványon. Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintesen, stabilan áll-e.

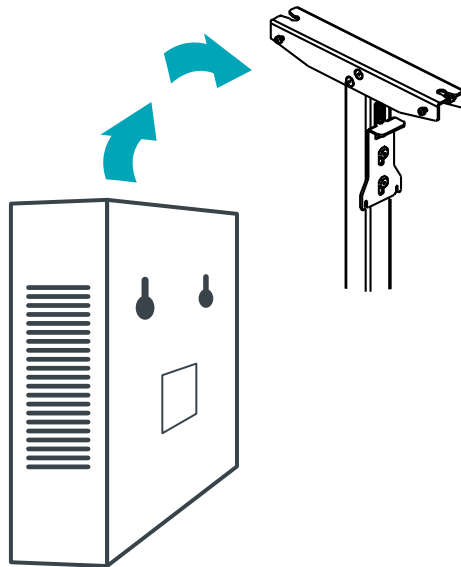


9. A készülék hátlapja felőli oldalán a rúdon lévő rugós rögzítő lemezt mozgassa felfelé majd lefelé, hogy annak alsó bevágása a készülékbe beakadjon. Ez a rögzítés akadályozza meg a készülék véletlen leesését. A rögzítő lemez oldalán lévő csavarok megszorításával a lemez igény szerint zárt pozícióban rögzíthető.

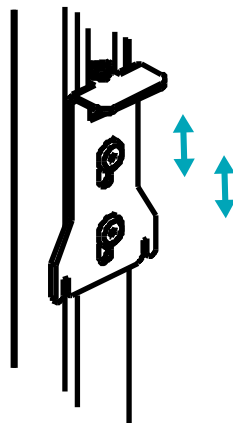

-
10. A készülék tápkábelét vezesse át az állvány T alakú felső idomának átellenes oldalára, ahol a vezeték rögzíthető egy bevágás segítségével.

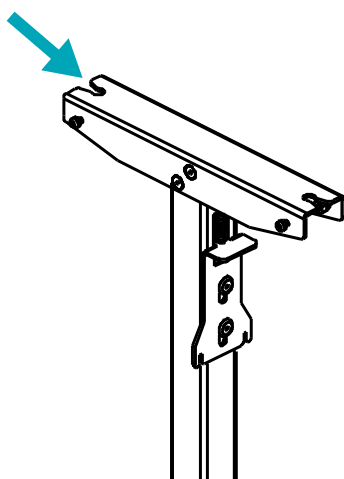

11. A lelógó kábelt húzza át a készülék alatt és szorítsa be a készülék alja és a rúd közé, amivel megakadályozható, hogy egyenetlen talajon az állvány mozgás közben zörögjön.
12. Csavarja a kábelt a rúd köré úgy, hogy vége a hosszabbítóig érjen, majd dugja be a csatlakozót a hosszabbítón lévő aljzatba. Ha a készülék csatlakozója elegendő hosszúságú, akkor közvetlenül is csatlakoztathatja az elektromos hálózathoz. Minden esetben ügyelni kell a csatlakozó kábelek elvezetésére, a botlásveszély megakadályozására.
12. Az állvány mozgásához egyenként oldja fel a kerekek rögzítését. Ehhez meg kell keresni a fékező pöcköket közvetlenül a kerekeknél (fékezett állapotban annak kioldó része függőlegesen felfelé áll), majd kézzel a kerék függőleges tengelye irányába kell húzni a kerékrögzítés kioldásához. A kerekek a későbbiekben lábbal is rögzíthetők, illetve kioldhatók.

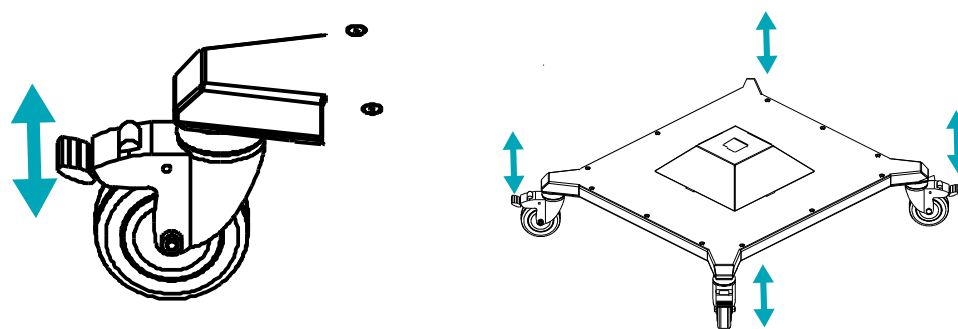

13. Az állvány magassága a használat során igény szerint módosítható. Ehhez elsőként távolítsa el a Protect 800 készüléke(ke)t az állványról a rögzítő lemez kioldásával (9.), majd pedig a készülék(ek) leemelésével. Ezt követően a rudazat rögzítő csavarjának kioldásával a rúd a kívánt magasságba állítható. A rúd készülékkel együtt történő mozgása balesetveszélyes, ezért nagy körültekintést igényel.